



PARTE PRIMA

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL REGISTRO DELLE APPARECCHIATURE ELETTRMEDICALI DI SALA OPERATORIA

Scopo delle presenti istruzioni operative è descrivere le modalità di compilazione del registro delle apparecchiature elettromedicali, predisposto in forma di checklist, che documenta l'avvenuto controllo e verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature elettromedicali utilizzate presso il blocco operatorio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria.

Le apparecchiature elettromedicali in dotazione al blocco operatorio sono collocate all'interno delle sale operatorie e nelle pre-sale, in base a precise esigenze funzionali.

Ogni sala operatoria è dotata dell'apposito registro.

I registri sono numerati dal n° 1 al n° 8 e collocati nella sala di corrispondenza.

La parte prima del registro contiene le suddette istruzioni operative per una corretta compilazione del registro stesso.

La seconda parte contiene l'elenco delle apparecchiature contenute nei sistemi (colonne video), suddiviso per la loro locazione standard.

Ogni registro è composto da diverse pagine, che saranno numerate di volta in volta, in maniera progressiva dall'infermiere che compila (in linea di massima per ogni seduta operatoria è utilizzata una pagina).

Ogni pagina riporta l'elenco delle apparecchiature di base identificate per ogni sala con il proprio codice identificativo e una serie di spazi vuoti dove sarà possibile aggiungere eventuali altre apparecchiature necessarie. Per le apparecchiature in cui non è riportato il codice identificativo, occorre trascrivere il numero seriale (che è presente, in genere su etichetta in ogni apparecchiatura), lo scopo è tracciare l'avvenuta verifica dell'apparecchiatura realmente utilizzata.

Le attività relative alla verifica delle apparecchiature di ogni specifica sala, devono essere svolte dal personale infermieristico della stessa sala, infermiere dell'equipe chirurgica e infermiere dell'equipe anestesiologicala, **prima dell'inizio della seduta operatoria**, e devono riguardare tutte le apparecchiature che saranno utilizzate in quella seduta operatoria.

La verifica di funzionamento delle apparecchiature prevede:

- controllo dell'accensione dell'apparecchiatura;
- controllo del normale funzionamento.

Per ogni apparecchiatura verificata deve essere compilata la corrispondente voce del registro operatorio.

Il registro deve essere compilato prima dell'inizio della seduta operatoria, dall'infermiere di sala, per quanto concerne le apparecchiature della sala operatoria, e dall'infermiere di anestesia, per le apparecchiature inerenti all'anestesia.

Nel registro si deve riportare:

- la data e l'ora in cui viene effettuata la verifica;

- se è stata effettuata la verifica, contrassegnando con una X la casella corrispondente sul “SI” o sul “NO”;
- l’esito ottenuto dopo il controllo, scrivendo “POS” in caso di buon funzionamento dell’apparecchiatura, o “NEG” in caso di cattivo funzionamento;
- la firma dell’infermiere che ha eseguito il controllo.

Se la verifica di funzionamento evidenzia una non conformità delle apparecchiature, l’infermiere informa immediatamente il coordinatore infermieristico del blocco operatorio (in sua assenza il sostituto), il quale segnalerà la non conformità al Servizio di Ingegneria Clinica, anche mediante l’apposita modulistica.

Tutte le volte in cui un’apparecchiatura risultasse conforme nella procedura di verifica all’inizio della seduta e dovesse, invece, presentare un guasto o un difetto durante l’esecuzione di un intervento chirurgico, questa deve essere allontanata dalla sala e sostituita con un’altra. Tale scambio deve essere prontamente segnalato nel registro delle apparecchiature e nelle note deve risultare:

- la descrizione dell’apparecchiatura introdotta;
- l’ora in cui è stata sostituita;
- il codice fiscale del paziente che in quel momento è sottoposto a intervento chirurgico.

Nello specchietto delle note si deve segnalare l’eventuale sostituzione di apparecchiature presenti nei sistemi (colonne video).

Il registro delle apparecchiature si conserva nei depositi della sala corrispondente.

Il registro delle apparecchiature si archivia nel box del coordinatore infermieristico del blocco operatorio.