



AOU Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



A. D. MDLXII

**Direzione Aziendale
"Produzione Qualità –Risk
Management"**

PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE INCUBATRICI E DEI LETTINI

Data	Revisione	redazione	approvazione	autorizzazione	N° archiviazione
04/04/2012	04/04/2012	Coord. Inf. D.ssa Maria Zicchi Inf. Pizzarri M. Giovanna Inf. Scanu Patrizia Dott. Augusto Ogana	Produzione Qualità Risk Management	Direzione Generale Direzione Sanitaria	



AOUI Sassari
U.O.C di
Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



Direzione Aziendale
“Produzione Qualità –Risk
Management”

INDICE:

1. Premessa
2. Scopo
3. Campo di applicazione
4. Terminologia, abbreviazioni, definizioni
5. Responsabilità
6. Riferimenti
7. Motivazioni
8. Descrizione attività
9. Archiviazione
10. Apparecchiature
11. Allegati

DA DISTRIBUIRE A:

Segreteria	
Ufficio Coordinatrice	
Sala Infermieri	
Ambulatorio	
Lavanderia	

DISTRIBUITO IL



AOU Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN



A. D. MDLXII

Istruzioni operative

**Direzione Aziendale
“Produzione Qualità –Risk
Management”**

1. Premessa

Le norme di seguito riportate si riferiscono a tutti i tipi di incubatrici e lettini in uso nel reparto. Le azioni specifiche per la pulizia, disinfezione, smontaggio e rimontaggio dei diversi tipi di incubatrici sono riportate nei manuali d'uso, le cui copie sono a disposizione del personale di supporto

2. SCOPO

Indurre un comportamento corretto da adottarsi nella pulizia e disinfezione delle incubatrici e dei lettini al fine di prevenire e ridurre l'insorgenza di infezioni ospedaliere neonatali e garantire un ambiente sicuro per il neonato.

3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Si applica nell'UO di Neonatologia e Terapia Intensiva dell'Azienda Ospedaliera Universitaria di Sassari.

4. TERMINOLOGIA ABBREVIAZIONI, DEFINIZIONI

AOU	Azienda Ospedaliero Universitaria
T.I.N.	Terapia Intensiva Neonatale
U.O.C.	Unità Operativa Complessa



AOU Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



A.D. MDLXII

**Direzione Aziendale
“Produzione Qualità –Risk
Management”**

5. RESPONSABILITA’

Ruoli	Medico U.O.	Coordinatore Infermieristico	Infermiere	Personale di supporto
Informazione personale e Diffusione protocolli		R	C	C
Programmazione interventi assistenza		R	C	C
Proposta revisione protocolli		R	C	
Verifica corretta applicazione protocolli		C	R	C
Applicazione protocollo pulizia quotidiana culle			C	R
Preparazione culle per pulizia/disinfezione finale			R	C
Verifica corretto funzionamento termoculle			R	C
Corretta Applicazione protocollo pulizia e disinfezione finale			C	R
Compilazione scheda avvenuta disinfezione			C	R
Sistemazione termoculla all'interno dell'U.O.			C	R
Segnalazione anomalie		C	R	C
R : Responsabile				
C: Coinvolto				

6. RIFERIMENTI



AOU Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



Direzione Aziendale
"Produzione Qualità –Risk
Management"

Linee guida per il controllo delle infezioni: raccomandazioni CDC 2010

Manuali culle termostatiche

7. MOTIVAZIONI

Uniformare il comportamento degli operatori sanitari nella pulizia e disinfezione delle termoculle e dei lettini.

Ridurre il rischio di sviluppo di colonie di agenti infettanti e la trasmissione da un neonato all'altro.

8. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

PULIZIA QUOTIDIANA

Indicazioni generali: prima di iniziare la detersione di una incubatrice o di un lettino occorre:

- effettuare lavaggio sociale delle mani e indossare guanti monouso;
- la pulizia inizia dalle parti più interne (campana interna, piano di appoggio, materasso) e continua verso le parti più esterne (campana esterna, unità di umidificazione);
- I guanti monouso ed il panno vanno eliminati come rifiuti pericolosi a rischio infettivo.

Indicazioni specifiche: la frequenza deve essere almeno una volta al giorno. Non applicare cerotti nella campana e nei lettini in plexiglass.

Il materiale da utilizzare consiste in:

- guanti monouso, panno monouso, soluzione detergente-disinfettante TRIGENE ADVANCE senza risciacquo pronta all'uso in flacone con erogatore a pressione.

Sequenza della pulizia:

- effettuare lavaggio sociale delle mani;



AOU Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



A.D. MDLXII

Direzione Aziendale
"Produzione Qualità –Risk
Management"

- indossare guanti monouso;
- togliere la biancheria dall'interno, eliminare eventuali residui sanitari;
- ripetere i primi due passaggi;
- distribuire il detergente-disinfettante sul panno pulito;
- strofinare la superficie da pulire;
- al termine, dopo la rimozione dei guanti, effettuare lavaggio sociale delle mani;
- è vietato utilizzare spugne;
- indossare guanti monouso per manipolare la vasca di umidificazione;
- rimuovere la vaschetta dell'acqua per umidificazione e lavarla con acqua corrente;
- riempire la vaschetta dell'acqua per umidificazione con acqua distillata e riportarla in sito.

PULIZIA E DISINFEZIONE TERMINALE

Definizione:

Per pulizia e disinfezione terminale si intendono quelle manovre da adottare per rimuovere correttamente la polvere e lo sporco e distruggere i germi patogeni presenti sulle superfici della culla.

Le operazioni vanno eseguite:

- quando il neonato lascia la termoculla o il lettino;
- dopo 7 giorni di occupazione da parte dello stesso neonato;
- dopo le operazioni di manutenzione o riparazione;
- se la termoculla rimane vuota, dopo 10 giorni dalla precedente detersione-disinfezione, si procede ad una nuova detersione.

Materiale occorrente:

- guanti monouso;
- panno monouso;
- detergente-disinfettante TRIGENE ADVANCE 1% in erogatore
- detergente-disinfettante TRIGENE ADVANCE 10% in presenza di sangue o altri materiali organici.

Principi generali

Incubatrici e lettini vanno smontati in tutte le loro parti. La pulizia inizia dalle parti più interne (piano di appoggio, piani sottostanti, materasso, campana interna) e continua via verso le parti esterne (campana esterna, pannello di controllo, unità di umidificazione, mensole e cassette, supporti, ruote).

La pulizia inizia dalle parti più alte (campana) verso quelle più basse.

Sequenza di pulizia e disinfezione :



AOI Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



**Direzione Aziendale
"Produzione Qualità –Risk
Management"**

Lavaggio sociale delle mani.

Indossare guanti monouso.

Preparare una soluzione di TRIGENE ADVANCE all'1% in acqua fredda

Spruzzare con lo spray che nebulizzi in maniera fine, lasciarlo a contatto per 5 minuti su tutte le parti lavabili: manicotti, guarnizioni, sportelli introduzione cavi, ventola, serbatoi d'acqua, materassino.

Asciugare con un telo, pulire bene, eliminare il telo.

Spruzzare nuovamente e lasciare il Trigene a contatto per 20 minuti.

Sciacquare le parti interne con acqua sterile e asciugare con un telo pulito.

Smontare come indicato nel manuale d'uso i piani sottostanti il materassino, detergere-disinfettare, seguendo la procedura precedentemente descritta, le parti sottostanti il piano di appoggio. Estrarle partendo da quella più interna verso quella più esterna, quindi risciacquare e asciugare bene.

Risciacquare e asciugare la ventola; riposizionare tutte le parti smontate.

Detergere-disinfettare la parti interne della campana, dopo averla aperta, con particolare attenzione alla zona circostante gli oblò ed asciugare.

Chiudere la campana e procedere alla detersione-disinfezione del sistema di umidificazione come indicato nel manuale specifico della culla che si sta trattando.

Detergere-disinfettare la parete esterna della campana, con particolare attenzione agli oblò ed asciugare.

Cambiare il panno e procedere alla detersione-disinfezione delle parti più basse dell'incubatrice, ruote, cassette o scompartimenti, cavi elettrici ed asciugare.

Riposizionare guarnizioni, manicotti, sportelli d'introduzione cavi, serbatoi d'acqua (vuoti).

Inserire nell'incubatrice l'apposito modulo compilato e firmato dall'operatore che ha effettuato la pulizia, che riporti la data dell'operazione; segnalare alla Coordinatrice eventuali guasti o anomalie riscontrate.

Riposizionare l'incubatrice in reparto o nella stanza deposito. Coprire con un telo pulito.

PER I LETTINI, seguire lo stesso procedimento.

I lettini devono essere ribaltati e lavati anche sotto.

Devono essere puliti anche i porta grafici.

Inserire l'apposito modulo di avvenuta pulizia-disinfezione come per le incubatrici.

Coprire con un telo pulito.

Riposizionare il lettino in reparto o nella stanza deposito.

9. ARCHIVIAZIONE



AOU Sassari

U.O.C di

Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



A.D. MDLXII

**Direzione Aziendale
“Produzione Qualità –Risk
Management”**

La presente procedura sarà consultabile presso l’U.O. di Cl. Neonatologica e TIN in Lavanderia, segreteria, ufficio della Coordinatrice. Inoltre sarà consultabile nel sito web aziendale alla voce Produzione e Qualità.

10. APPARECCHIATURE

Culle termostatiche Ohmeda, Ginevri, Drager

Lettini



AOU Sassari
U.O.C di
Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



Direzione Aziendale
“Produzione Qualità –Risk
Management”

11.ALLEGATI E APPENDICI

Allegato 1

SCHEDA PULIZIA E DISINFEZIONE TERMINALE

DATA	CODICE CULLA	FIRMA OPERATORE SUPPORTO	FIRMA INFERMIERE	NOTE



AOU Sassari
U.O.C di
Clinica Neonatologica e TIN

Istruzioni operative



Direzione Aziendale
“Produzione Qualità –Risk
Management”

Allegato 2

Nome

Cognome

SOSTITUZIONE PERIODICA CULLE

DATA	FIRMA INFERMIERE/A